

Per posar-les...



1 Higienitza les mans amb aigua i sabó o amb un preparat en base alcohòlica.



2 Identifica la part superior de la mascareta; té el plec cap avall.



3 Ajusta les gomes, agafant-les per la part superior i sense entrecreuar-les.



4 Col·loca la mascareta, assegurant que queda ajustada al nas, boca i barbata.

Per treure-les...



1 Higienitza les mans amb aigua i sabó o amb un preparat en base alcohòlica.



2 Treu la mascareta agafant la goma per la part superior i estira cap amunt.



3 Llença la mascareta al contenidor específic i evitant el contacte directe.




4 Higienitza les mans amb aigua i sabó o amb un preparat en base alcohòlica.


Guia per fer servir... MASCARETES




Recomanacions d'ús

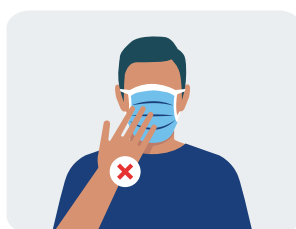


No toquis la part frontal de la mascareta; existeix risc de contaminació.

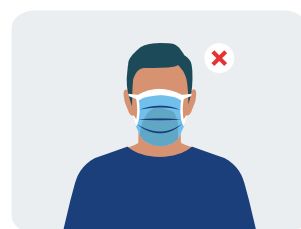

No allarguis la vida útil de la mascareta; consulta el temps màxim d'ús.

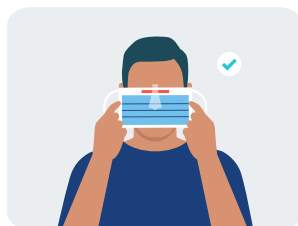

La mascareta ha de tancar el nas i la boca; no dur-la per sota del nas.

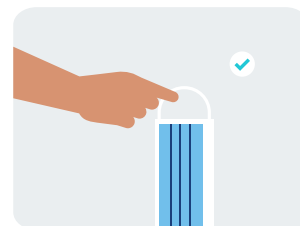

Per a les mascaretes de teixit reutilitzables, consultar les instruccions del fabricant.

Quan les substituïm?



Quan notem que està bruta o humida.



Quan entrem i sortim d'entorns infecciosos.



Quan finalitzi l'activitat professional.