

Cómo usar... BUZOS DE PROTECCIÓN

Antes de colocarlo...



Retira las joyas de tu cuerpo.



Recoge bien tu cabello.



Lava y desinfecta tus manos.



¿Cómo colocar el buzo?



Coloca el primer par de guantes.



Introduce las piernas en el buzo.



Sube el buzo y mete los brazos.



Coloca la protección facial.



Cierra el buzo y ponte la capucha.



Ponte el segundo par de guantes.


¿Cómo retirar el buzo?




Retira el segundo par de guantes.



Desinfecta los primeros guantes.

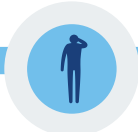

Quita la capucha y desabróchate.

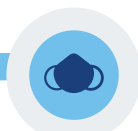

Retira el resto de EPIs.



Tira el material a una bolsa GII.



Lava tus manos con agua y jabón.