

GUÍA DE USO

MASCARILLAS



1

HIGIENIZA

tus manos con agua y jabón o con un preparado en base alcohólica



IDENTIFICA

la parte superior de la mascarilla, que se diferencia por tener el pliegue hacia abajo



AJUSTA

las gomas o lazos, cogiéndolos por parte superior y sin entrecruzarlos



COLOCA

la mascarilla de forma que cubra nariz, boca y barbilla y que quede bien ajustada

PARA RETIRARLAS



HIGIENIZA

tus manos con agua y jabón o con un preparado en base alcohólica



RETIRA

la mascarilla agarrando la goma por la parte inferior y tira hacia arriba



DESECHA

la mascarilla en un contenedor específico evitando el contacto



HIGIENIZA

tus manos con agua y jabón o con un preparado en base alcohólica

CONSEJOS DURANTE EL USO



NO TOCAR LA PARTE FRONTAL MIENTRAS SE USA NI AL RETIRARLA; HAY RIESGO DE CONTAMINACIÓN



NO ALARGAR LA VIDA DE LA MASCARILLA; SEGUIR LAS INDICACIONES PARA SU DESECHO O REUTILIZACIÓN



LA MASCARILLA DEBE TAPAR NARIZ Y BOCA; NO COLGADAS AL CUELLO, EN EL MENTÓN O SOLO CUBRIENDO LA BOCA



PARA LAS MASCARILLAS REUTILIZABLES SEGUIR LAS INDICACIONES DE HIGIENE DEL FABRICANTE

CUÁNDO SUSTITUIR LA MASCARILLA



CUANDO NOTEMOS QUE ESTÁ SUCIA O HÚMEDA



CUANDO HAYA SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN



CUANDO FINALICE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

www.papelmatic.com