


Buzos de protección

Antes de empezar...



- Retira cualquier objeto personal de tu cuerpo.
- Recoge tu cabello en caso de que sea largo.
- Higieniza tus manos con jabón o antiséptico.

Colocación

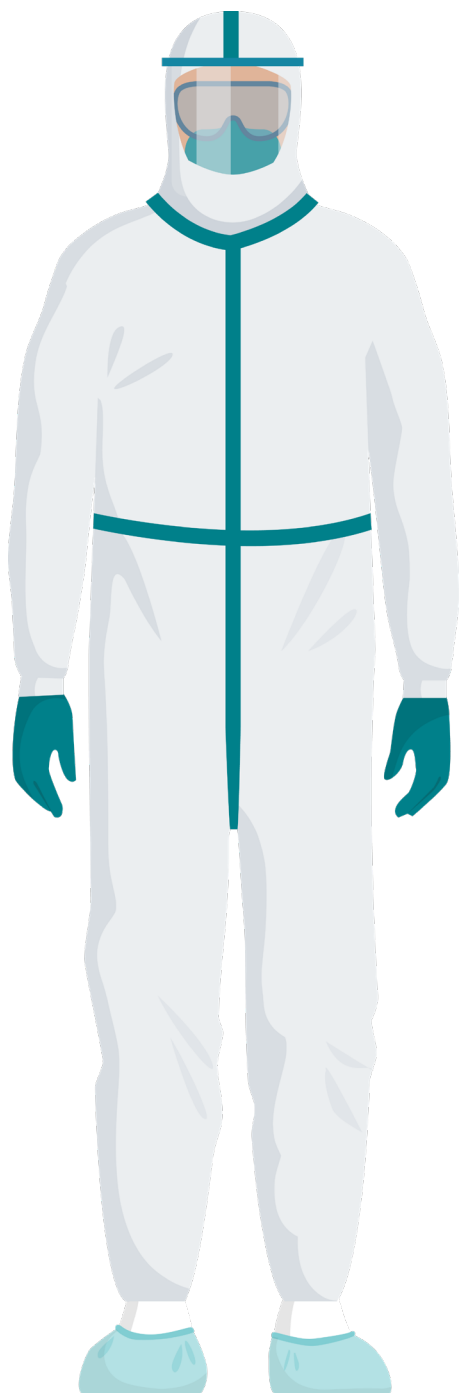

PASO 1
Ponte el primer par de guantes.



PASO 2
Introduce las piernas en el buzo.



PASO 3
Sube la prenda e introduce los brazos.



PASO 4
Ponte los equipos de protección facial.



PASO 5
Cierra el buzo y coloca la capucha.



PASO 6
Ponte el segundo par de guantes.

Retirada



PASO 1
Retira el segundo par de guantes.



PASO 2
Desinfecta el primer par de guantes.



PASO 3
Retira la capucha y desabrocha el buzo.



PASO 4
Retira el resto de EPIs.



PASO 5
Desecha el material en una bolsa GII.



PASO 6
Lava tus manos con agua y jabón.