

PRO3205

 **PAPELMATIC**

GORRO INTEGRAL CON MASCARILLA TRIPLE CAPA

Gorro integral con mascarilla desechable tejido no tejido.



CARACTERÍSTICAS:

- Producto de un solo uso, NO REUTILIZAR.
- Talla: Única
- Color: Azul
- Material: Gorro 100% Polipropileno, 20(+/-3) Gr.
Mascarilla 100% Polipropileno 30(+/- 2) Gr., 100% papel filtrante, 20 (+/-2) Gr.
- Otros materiales: Elástico industrial recubierto de algodón (no contiene látex)
Ajuste nasal metálico recubierto de polietileno.

SECTORES:



HOSPITALES



CENTROS
SOCIOSANITARIOS



INDUSTRIA
ALIMENTARIA



HOTELES



INDUSTRIA




INDUSTRIA
AUTOMOVILÍSTICA



INDUSTRIA
QUÍMICA

CARACTERÍSTICAS:

Material	Polipropileno (PP)
Cierre	Goma elástica
Tiempo máximo de uso	4 horas.

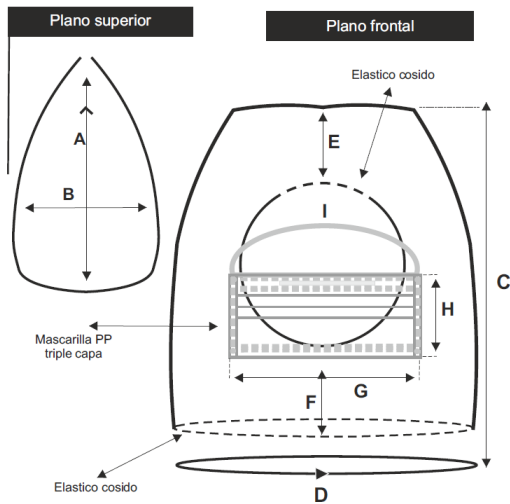

Detalle	Medida (cm)	Tolerancia (cm)
A	25.0	(+/-1.0)
B	15.0	(+/-1.0)
C	36.0	(+/-1.0)
D	66.0	(+/-1.5)
E	6.0	(+/-1.0)
F	14.0	(+/-1.0)
G	17,5	(+/-0.5)
H	9,4	(+/-0.5)
I	25.0	(+/-1.0)

NORMATIVAS:

EPI Categoría 1, confeccionado y marcado CE, compatible con uso alimentario 2011/10CE

CE

Almacenado y uso: Se recomienda utilizar el producto una sola vez, la utilización prolongada o mas de un solo uso minimizara las funciones para las que ha sido fabricado, en su colocación debe de tener cuidado en no elongar mas de lo que el producto permite ya que se corre el riesgo de romper el tejido o los elásticos.

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10°y30°C, sin exponer a la luz solar directa.



HIGIENIZA

tus manos con agua y con jabón o con un preparado con base alcohólica



IDENTIFICA

la parte superior de la mascarilla que se distingue por tener el pliegue hacia abajo



POSICIONA

la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz y coloca la goma de arriba hacia abajo



COLOCA

la mascarilla de forma que cubra la nariz, la boca y la barbilla y no queden espacios



HIGIENIZA

tus manos con agua y con jabón o con un preparado con base alcohólica



RETIRA

la mascarilla agarando la goma por la parte inferior y tira hacia arriba



GUARDA

la mascarilla en un lugar seguro antes de lavarla o deséchala si ha cumplido su ciclo



HIGIENIZA

tus manos con agua y con jabón o con un preparado con base alcohólica

PAPEL AUTOMATIC, S.A.
C/Progrés, 45 (Pol. Ind. Almeda)
Cornellà de Llobregat (CP 08940)
Tel. 902 500 535
info@papelmatic.com
www.papelmatic.com