

PRO3892



# Mascarilla quirúrgica Tipo IIR con gomas

## Datos técnicos

**Clip Nariz:** 11 cm

**Color:** Bicolor - Azul Claro y Azul Cielo

**Medidas mascarilla:** 17,5 x 9,5 cm

**Elásticos de ajuste:** 17,5 cm

Mascarilla y Gomas libres de Látex, Grafeno y Fibra de Vidrio, no produce irritaciones.

## Normativas y uso:

Producto Conforme al **Reglamento UE 2017/745** relativo a los productos sanitarios - Clase I

Producto Fabricado bajo los estándares de la Norma ISO 13485:2003+AC2007.

Mascarilla Fabricada en Sala Blanca  
Acorde a Normativa Vigente

La Mascarilla responde ante las exigencias de la norma  
**EN 14683:2019+AC2019**

Ensayo N°: GOLMOXKC355595L1

Laboratorio Acreditado por CNAS N°: L0412



## Descripción

Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR , fabricada en tres capas de tela no tejida y tejido filtrante, con tira nasal moldeable en Acero+PP y dos gomas de ajuste suaves.

## Información logística

Etiquetado Conforme a la Norma **14683:2019+AC:2019** y **Producto Sanitario Clase I.**

### Presentación:

- Estuche dispensador de 50 unidades.
- Embalaje Master de 2000 unidades (40 estuches).
- Euro Palets de 32 embalajes.
- EAN: 96974100420423

## Instrucciones de uso

- Comprobar el estado de la mascarilla y caducidad antes de su uso.
- No utilizar la mascarilla un tiempo superior a 4 horas
- Lávese las manos antes de utilizar la mascarilla y toque únicamente la goma de la mascarilla
- Colocar la mascarilla sobre la nariz/boca y pasar las gomas por detrás de las orejas
- Ajustar adecuadamente la tira nasal y zona del mentón
- Evitar en todo momento tocar o manipular la mascarilla durante su uso

**PAPELMATIC**



902 500 535



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com