

# PRO3390

## MASCAA HIGIÉNICA

### 3 CAPAS

Mascarilla higiénica fabricada por Papelmatic con materiales de origen local y calidad certificada.

Con tira moldeable en la parte superior para una mejor sujeción nasal y con elástico de ajuste para una mejor adaptación en ambos pabellones auditivos.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Producto de un solo uso; no reutilizar.
- ✓ No estéril.
- ✓ No se recomienda usar la mascarilla durante más de 4 horas.

## SECTORES:



SERVICIOS



ESTÉTICA Y BELLEZA



HOSPITALES



CENTROS SOCIO-SANITARIOS



LABORATORIOS



INDUSTRIA



INDUSTRIA QUÍMICA




INDUSTRIA ALIMENTARIA

## CARACTERÍSTICAS:

Material	Polipropileno (PP)
Composición	Spunbond (PP) 25gr/m <sup>2</sup> Meltblown 25gr/m <sup>2</sup> Spunbond (PP) 20gr/m <sup>2</sup>
Medidas	17,5 x 9,5 cm
Cierre	Gomas elásticas laterales
Color	Azul
Unidades	200 paquetes de 5 unidades

\*Serigrafiadas con la marca Papelmatic como garantía de calidad y autenticidad.

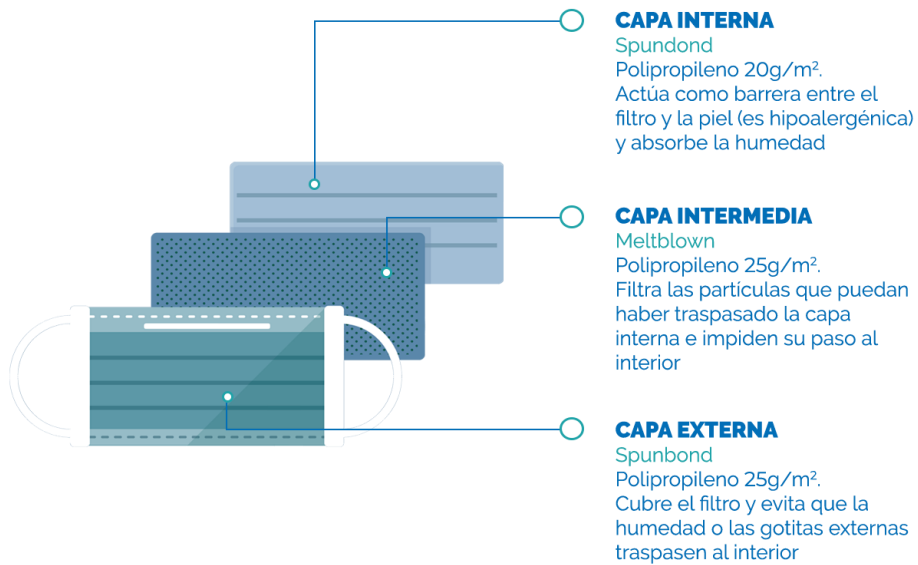

## ADVERTENCIA:

Este producto no es producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

## INSTRUCCIONES:

- ✓ Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas de entre -2°C y 50°C.
- ✓ No exponer directamente a la luz solar.

## NORMATIVA:

Mascarilla higiénica  
UNE 0064-1:2020

Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB)	≥95%
Presión diferencial (respirabilidad)	<60Pa/cm <sup>2</sup>

## EMBALAJE:



EMBALAJE CAJA

Cada caja de 1.000 unidades contiene 20 cajitas (con 50 unidades en cada cajita).

Cada cajita de 50 unidades está dividida en 10 sobres de 5 mascarillas cada uno.

## CONSEJOS DE USO:



**1** **HIGIENIZA**  
tus manos con agua y  
con jabón o con un  
preparado con base  
alcohólica



**2** **IDENTIFICA**  
la parte superior de la  
mascarilla que se  
distingue por tener el  
pliegue hacia abajo



**3** **POSICIONA**  
la mascarilla en la cara,  
a la altura de la nariz y  
coloca la goma de arriba  
hacia abajo



**4** **COLOCA**  
la mascarilla de forma  
que cubra la nariz, la  
boca y la barbilla y no  
queden espacios



**5** **HIGIENIZA**  
tus manos con agua y  
con jabón o con un  
preparado con base  
alcohólica



**6** **RETIRA**  
la mascarilla agarando  
la goma por la parte  
inferior y tira hacia  
arriba



**7** **GUARDA**  
la mascarilla en un lugar  
seguro antes de lavarla  
o deséchala si ha  
cumplido su ciclo



**8** **HIGIENIZA**  
tus manos con agua y  
con jabón o con un  
preparado con base  
alcohólica

PAPEL AUTOMATIC, S.A.  
C/Progrés, 45 (Pol. Ind. Almeda)  
Cornellà de Llobregat (CP 08940)  
Tel. 902 500 535  
[info@papelmatic.com](mailto:info@papelmatic.com)  
[www.papelmatic.com](http://www.papelmatic.com)