

PRO3393

 **PAPELMATIC**

MASCARILLA BLANCA FFP2

Mascarilla FFP2, blanca, 4 capas con tela filtrante fundida y sin válvula.



CARACTERÍSTICAS:

- Producto de un solo uso, NO REUTILIZAR.
- Color: Blanco.
- Mascarilla protección de polipropileno.
- Elásticos de ajuste y tira moldeadora en la parte superior para provocar una mejor sujeción nasal.

SECTORES:



HOSPITALES



INDUSTRIA ALIMENTARIA



CENTROS SOCIO-SANITARIOS



LABORATORIOS



HOTELES



INDUSTRIA



INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA



INDUSTRIA QUÍMICA

CARACTERÍSTICAS:

Material	Polipropileno (PP)
Cierre	Goma elástica
Tiempo máximo de uso	40 horas.

Esta mascarilla es un dispositivo de protección respiratoria
Contra partículas, aerosoles sólidos y líquidos, consta de
cuatro capas de las siguientes características:

- Segunda capa - Spunbond de Polipropileno.
 - Tercera capa - Spunlance de Polipropileno Hidrófobo.
 - Capa interior - Spunbond de Polipropileno.
-
- Pinza metálica nasal de 5mm. De ancho, y 88 mm. De largo.
 - Banda de ajuste elástica exenta de látex en cada uno de los dos laterales de 165 mm. De largo.
 - Sin válvula de exhalación.
 - Filtración de partículas mínima del 95%.
 - Baja resistencia a la inhalación debido a la acción mecánica y electrostática.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

Almacenar siempre en el embalaje original, en lugar seco y temperaturas oscilantes entre -2º y +50º. No exponer directamente a la luz.

Talla	Clip Nariz	Goma	Color	Materias	PFE
Adulto	8.2 cm	19 cm	Blanco	50grs+50grs+50grs+25grs	>= 95%


NORMATIVAS:

- Reglamento (UE)2016/425 Relativa a los equipos de protección personal.
Clasificación: FFP2 NR
Categoría EPI: Categoría 3.
Standard: EN 149:2001+A1:2009.
Certificado CE N°: 0370-4121-PPE/B

Es conforme a la Norma Amortizada Europea EN 149:2001+A1:2009.

CE 0370

EMBALAJE

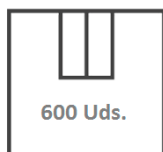

EMBALAJE CAJA

CAJITAS DE 50 UDS. (25 SOBRES DE 2 MASCARILLAS)



HIGIENIZA

tus manos con agua y con jabón o con un preparado con base alcohólica



IDENTIFICA

la parte superior de la mascarilla que se distingue por tener el pliegue hacia abajo



POSICIONA

la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz y coloca la goma de arriba hacia abajo



COLOCA

la mascarilla de forma que cubra la nariz, la boca y la barbilla y no queden espacios



HIGIENIZA

tus manos con agua y con jabón o con un preparado con base alcohólica



RETIRA

la mascarilla agarando la goma por la parte inferior y tira hacia arriba



GUARDA

la mascarilla en un lugar seguro antes de lavarla o deséchala si ha cumplido su ciclo



HIGIENIZA

tus manos con agua y con jabón o con un preparado con base alcohólica

PAPEL AUTOMATIC, S.A.
C/Progrés, 45 (Pol. Ind. Almeda)
Cornellà de Llobregat (CP 08940)
Tel. 902 500 535
info@papelmatic.com
www.papelmatic.com