

PRO3372

 **PAPELMATIC**

MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR

3 CAPAS

Mascarilla de polipropileno rectangular de 3 capas, con 3 pliegues, que permiten un mejor acople anatómico.

Con tira moldeable en la parte superior para una mejor sujeción nasal y con elástico de ajuste para una mejor adaptación en ambos pabellones auditivos.



PROPIEDADES FÍSICAS:

- ✓ Materia prima primera capa: Spunbond (PP) 25 gr/m².
- ✓ Materia prima segunda capa: Meltblown (PP) 25 gr/m².
- ✓ Materia prima tercera capa: Spunbond (PP) 20 gr/m².

SECTORES:

CARACTERÍSTICAS:



SERVICIOS



COMERCIOS



CENTROS
SOCIOSANITARIOS



HOSPITALES



LABORATORIOS



TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA

Composición	Polipropileno
Capas	3
Medidas	17,5 x 9,5 cm
Cierre	Gomas elásticas laterales
Color	Azul
Unidades	20 cajitas de 50 unidades (5 paquetes de 10 unidades)

*Serigrafiadas con la marca Papelmatic como garantía de calidad y autenticidad.

INSTRUCCIONES:

- ✓ Producto de un solo uso.
- ✓ Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre -2°C y 50°C.
- ✓ No exponer directamente a la luz solar.
- ✓ Tiempo máximo de uso 4 horas.

NORMATIVAS:

Mascarilla quirúrgica tipo IIR

- ✓ Directiva 93/42/CE – Clase I de productos sanitarios
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745
- ✓ EN 14683:2019+AC:2019
- ✓ Licencia AEMPS 3214 – PS

Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB)	≥98%
Presión diferencial (respirabilidad)	<60Pa/cm ²
Presión de resistencia a salpicaduras	≥16 kPa
Limpieza microbiana/carga biológica	≤30 ufc/g

Ensayo realizado por laboratorio Aitex.

Producto 100% libre de látex y fibra de vidrio.



EMBALAJE:



EMBALAJE CAJA

Cada caja de 1.000 unidades contiene 20 cajitas (con 50 unidades en cada cajita).

Cada cajita de 50 unidades está dividida en 10 sobres de 5 mascarillas cada uno.

CONSEJOS DE USO:



1 HIGIENIZA
tus manos con agua y
con jabón o con un
preparado con base
alcohólica



2 IDENTIFICA
la parte superior de la
mascarilla que se
distingue por tener el
pliegue hacia abajo



3 POSICIONA
la mascarilla en la cara,
a la altura de la nariz y
coloca la goma de arriba
hacia abajo



4 COLOCA
la mascarilla de forma
que cubra la nariz, la
boca y la barbilla y no
queden espacios



5 HIGIENIZA
tus manos con agua y
con jabón o con un
preparado con base
alcohólica



6 RETIRA
la mascarilla agarando
la goma por la parte
inferior y tira hacia
arriba



7 GUARDA
la mascarilla en un lugar
seguro antes de lavarla
o deséchala si ha
cumplido su ciclo



8 HIGIENIZA
tus manos con agua y
con jabón o con un
preparado con base
alcohólica

PAPEL AUTOMATIC, S.A.
C/Progrés, 45 (Pol. Ind. Almeda)
Cornellà de Llobregat (CP 08940)
Tel. 902 500 535
info@papelmatic.com
www.papelmatic.com